

Filtrierende Halbmasken

GEBRAUCHSANLEITUNG


WICHTIG:

Man unterscheidet 3 Kategorien von filtrierenden Halbmaskengegen feste und flüssige Aerosole: FFP1, FFP2 und FFP3. Bevor Sie diese Information weiterlesen, prüfen Sie bitte, zu welcher Kategorie Ihre Maske gehört. Sie finden diese Information sowohl auf der Maske als auch auf der Verpackung.

ANWENDUNGEN:

- * **FFP1:** Filtrierende Halbmaske der Kategorie FFP1 schützen gegen feste und flüssige Partikel von allen Feinstäuben bis zum 4fachen des jeweils gültigen MAK- bzw. TRK-Wertes.
- * **FFP2:** Filtrierende Halbmasken der Kategorie FFP2 schützen gegen feste und flüssige Partikel von allen Feinstäuben bis zum 10fachen des jeweils gültigen MAK- bzw. TRK-Wertes.
- * **FFP3:** Filtrierende Halbmasken der Kategorie FFP3 schützen gegen feste und flüssige Partikel von allen Feinstäuben bis zum 30fachen des jeweils gültigen MAK- bzw. TRK-Wertes.

AUFSETZANLEITUNG:

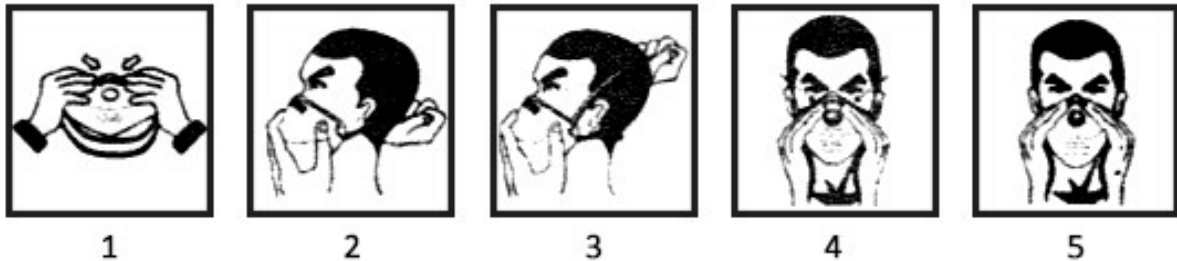

1. Einen Finger in die Maske legen. Den Nasenclip um den Finger biegen, damit die Nasenform entsteht.
2. Die Maske über Mund und Nase halten und die Befestigungsbänder um den Kopf legen - die untere Bandschleife um den Nacken.
3. Die obere Schlaufe oberhalb der Ohren über den Hinterkopf ziehen und anlegen.
4. Mit beiden Händen den Nasenclip der Nase anpassen und die obere und untere Schlaufe des durchgehenden Kopfbandes so anziehen, dass die Maske dicht am Gesicht anliegt.
5. a) Passend für filtrierende Halbmasken ohne Ausatemventil: indem Sie die Maske mit beiden Händen umschließen und kräftig ausatmen.
b) Passend für filtrierende Halbmasken mit Ausatemventil: indem Sie die Maske mit beiden Händen umschließen und atmen Sie tief ein. Bei Luftaustritt am Nasenbügel muss dieser stärker angedrückt werden. Bei anderen undichten Stellen den Sitz der Maske leicht verändern und der Gesichtsform anpassen.
6. Maske sofort austauschen, wenn das Atmen schwieriger wird oder die Maske beschädigt oder so verformt ist, dass eine optimale Abdichtung nicht mehr gewährleistet ist Maske nur gemäß dieser Aufsetzanleitung benutzen.

WARNHWEISE:

1. Missachtung der hier gegebenen Anweisungen oder Anwendungsbeschränkungen für dieses Produkt können die Wirksamkeit dieser Maske reduzieren und Übelkeit oder gar Tod zur Folge haben.
2. Eine sorgfältig ausgesuchte Maske ist essentiell zum Schutz Ihrer Gesundheit. Vor der Anwendung dieser Maske konsultieren Sie eine entsprechende Sicherheitsorganisation, um festzustellen, ob diese Maske den Anforderungen des geplanten Einsatzbereiches entspricht.
3. Filtrierende Halbmasken sind von der Umgebungsatmosphäre abhängig. Nur in ausreichend belüfteten Umgebungen verwenden. Nicht verwenden, wenn die Atmosphäre weniger als 17% Sauerstoff enthält.
4. Atemschutzmasken dürfen nicht eingesetzt werden, wenn die Konzentration der Schadstoffe eine unmittelbare Bedrohung für die Gesundheit oder das Leben darstellen.
5. Nicht in einer explosiven Atmosphäre benutzen.
6. Der Arbeitsraum ist sofort zu verlassen, wenn (a) das Atmen schwierig wird, (b) Schwindel oder Erschöpfung auftreten.
7. Gesichtshaare sowie spezielle Charakteristika der Gesichtsform können u.U. die Wirksamkeit dieser Maske reduzieren.
8. An der Maske dürfen keine Veränderungen oder Modifikationen vorgenommen werden.
9. Zum einmaligen Gebrauch bestimmt. Keine Pflege notwendig. Nach Gebrauch fachgerecht entsorgen.
10. Masken in der Verpackung vor direkter Sonneneinwirkung entfernt bis zum Gebrauch aufbewahren.

ABKÜRZUNGEN:

MAK = Maximale Arbeitsplatz-Konzentration.
TRK = Technische Richtkonzentration.